

Medicart Volet Roulant



A l'instar du Medicart Tiroirs, le Medicart Volet Roulant est un chariot multifonctionnel modulaire qui se distingue par le choix de ses matériaux durables, son ergonomie, ses propriétés hygiéniques, et sa conception unique.

Afin de pouvoir satisfaire aux mieux vos besoins, ce chariot offre une multitude de possibilités pour le remplissage : des paniers aux plateaux, montés sur parois droites ou ergonomiques.

Pour les soins, le transport et/ou la distribution de médicaments, le Medicart Volet Roulant est une solution ergonomique, hygiénique, et garantit également la sécurité des patients.

En alternative à la version grise standard, vous pouvez également opter pour une finition en aspect bois.



Le contenu et les accessoires du chariot peuvent être adaptés selon les désirs du client. Il est même possible de combiner des modules et des plateaux de médicaments.



» Volet roulant en plastique

Le chariot est équipé d'un bouton poussoir permettant d'ouvrir le volet de façon **simple et ergonomique**. En ouvrant le volet, celui-ci s'enroule en un **seul mouvement** dans une cassette hermétique. Ainsi, la poussière n'entrave pas le bon fonctionnement du système.

La conception de ce chariot permet de nettoyer facilement tant l'intérieur de ce dernier que le volet roulant.



» Poignée

Le volet roulant en plastique est muni d'une **poignée en aluminium sur toute la largeur**. Grâce à cette poignée, le volet roulant peut être fermé de manière sûre et ergonomique.





» Serrure

Une serrure électronique est prévue par défaut et **bloque le bouton poussoir** en mode de fermeture. Un code à 4 chiffres permet de le déverrouiller. Le bouton poussoir ainsi que la serrure électrique sont situés juste en dessous de la table de travail. L'autonomie des piles permet d'assurer environ 30.000 utilisations de la serrure électronique. Lorsque les piles sont déchargées, une **clé de secours** permet alors d'ouvrir le chariot. Alternativement, un **verrouillage badge** est également possible.

» Medicart Voilet Roulant - Remplissage

Les formules suivantes permettent de calculer facilement le remplissage du Medicart Voilet Roulant:

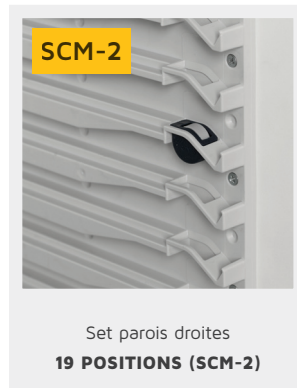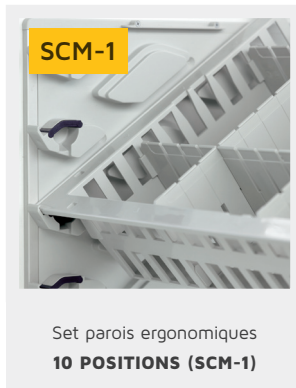

Pour la sélection de modules, paniers et arrêts il est conseillé de les choisir de la gamme **SCM**

Pour la sélection de modules, paniers et arrêts il est conseillé de les choisir de la gamme **MDS**

Dimensions Medicart: 738 x 566 x 1158 mm
Hauteur standard du plan de travail: 1108 mm

Nombre de positions	SCM-1	SCM-2	MDS-1	MDS-2	
Module ou panier de 50 mm	1	2	2	2	
Module ou panier de 100 mm	2	4	3	4	
Module ou panier de 200 mm	3	6	5	6	
Plateau avec bacs Medina	1	2	1	2	
Plateau avec bacs T-clear bas	2	3	3	3	
Plateau avec bacs T-clear haut	2	4	3	4	
Plateau avec bacs Vita	1	2	2	2	
Tablette en LHP	1	1	1	1	

» Medicart Volet Roulant - Composants



» Medicart Volet Roulant avec serrure électronique

Numéro d'article	Description	Couleur	Dimensions ext.
<u>19036 00001</u>	Sans parois	Gris	738 x 566 x 1158 mm



» Set de parois pour Medicart Volet Roulant

Numéro d'article	Type	Description	Nombre de positions
<u>19030 00012</u>	SCM-2	Glissière droite	19
<u>19030 00011</u>	MDS-1	Glissière ergonomique	14
<u>19030 00010</u>	MDS-2	Glissière droite	20
Sur demande	SCM-1	Glissière ergonomique	10



» Guides télescopiques avec structure pour panier

Numéro d'article	Dimensions ext.
17004 00020	600 x 400 mm



» Guides télescopiques avec structure pour bacs à médicaments

Numéro d'article	Description	Dimensions ext.
17004 00025	Pour bacs T-clear	600 x 400 mm
17004 00050	Pour bacs Vita	600 x 400 mm



» Fermeture badge (sur demande)

Numéro d'article
19030 00016

Pour remplissage avec modules, paniers et séparateurs: voir le chapitre "Transport et stockage modulaires".

Article standard (articles non-standard ont un délai de livraison plus long)