


# Siliconenmatje

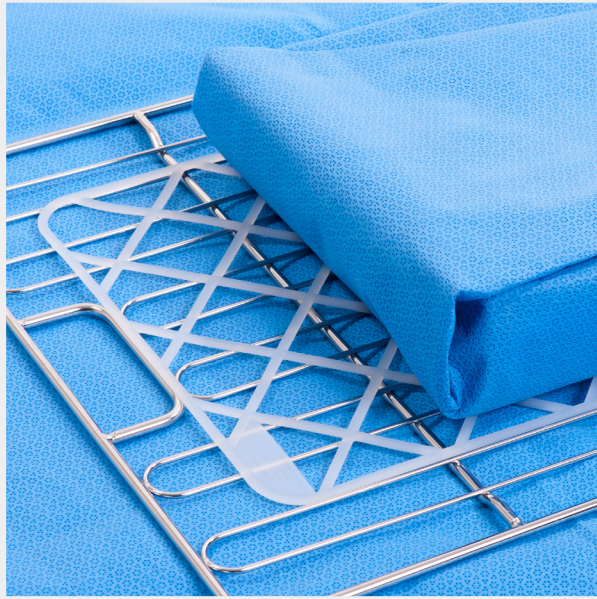

Het siliconenmatje wordt vooral gebruikt binnen CSA om tussen de ingepakte instrumentenmand en de draadplateau of de draadmand te plaatsen.

Door de sterke antislip eigenschappen blijft de ingepakte instrumentenmand netjes op haar plaats en verschuift niet of glijdt niet weg.


In combinatie met de Sterisystem® Perfo-Safe® transportmanden en transportplateaus, zijn de siliconenmatten een onmisbaar onderdeel van steriele opslag en transport.

De slijtvaste materie van het siliconenmatje, bestendig tegen chemicaliën en bacteriën is uitermate geschikt voor herhaald gebruik binnen de centrale sterilisatie afdeling.




## » Anti-slip functie

Doordat de ingepakte instrumentenmand niet kan bewegen tijdens het transport wordt vermeden dat er beschadiging of perforatie optreedt van het verpakkingsmateriaal, waardoor de steriele voorwaarden binnen CSA gegarandeerd worden.

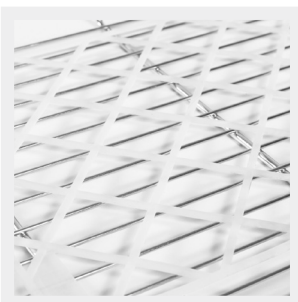

## » Silicone


Het materiaal waaruit het siliconenmatje is samengesteld voldoet aan de Europese Directive 2002/72/EC Chemische veiligheid van levensmiddelen en is temperatuurbestendig van -40°C tot 200°C. Deze materie is slijtvast, bestendig tegen chemicaliën en bacteriën, en 100% brandveilig. Daardoor is er geen enkel probleem voor een herhaald gebruik binnen de CSA.

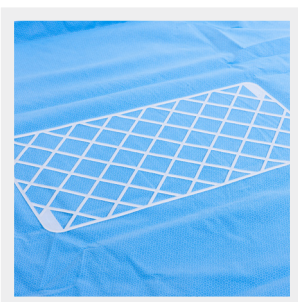

## » Specifiek ontwerp

Het specifieke ontwerp garandeert een gelijkmatige warmteverdeling en perfecte doorlaatbaarheid van de stoom binnen de autoclaaf. De standaardkleur is wit. De dunne versie is geschikt voor intern transport, de "heavy duty" versie van 6 mm dik is beter geschikt voor extern transport.

## » Siliconenmatje

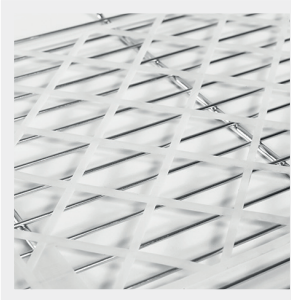

» Siliconenmatje voor Sterisystem® Perfo-Safe® draadmanden en draadplateaus

Artikelnummer	Beschrijving	Dikte	GTIN	Buitenafmetingen
30010 00004	Standard	3 mm	05404019100952	540 x 280 mm
30010 00006	Heavy duty	6 mm	05404019100969	600 x 324 mm