

## Sterisystem® open Stericart - 18006 serie




De Sterisystem® open Stericart in roestvrij staal is ontworpen voor het intern transport van zowel instrumentensets als verbruiksgoederen tussen de CSA en het OK.

Deze modulaire open transportwagen bestaat zowel in ISO-maatvoering (600 x 400 mm) als in dubbele DIN maatvoering (600 x 600 mm). Bij het gebruik van de dubbele DIN uitvoering verdubbelt de capaciteit per niveau indien de instelling DIN transportmanden of -plateaus gebruikt.

De standaardhoogte van 1500 mm laat toe om tijdens het transport nog boven de kar uit te kijken.

De Sterisystem® open Stericarts zijn wastunnelbestendig dankzij de hoogwaardige materialen en de speciaal voor deze toepassing ontwikkelde wielen.

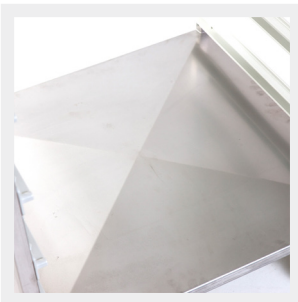

### » Hygiëne

Onderaan zijn de Sterisystem® open Stericarts voorzien van een vanuit het midden aflopende bodemplaat. Hierdoor zijn de getransporteerde goederen beschermd tegen opspattend vocht of vuil.

Deze X-bodemplaat zorgt er ook voor dat tijdens het was- en droogproces geen water kan achterblijven.



### » Wastunnelbestendig

Door de keuze voor hoogkwalitatieve, niet-corrosieve materialen en componenten, kan de Sterisystem® open Stericart gereinigd worden in de wastunnel.

Zowel het RVS AISI 304 corpus, als de polyamide geleiders en de wielen, zijn getest op wastunnelbestendigheid.



### » Unieke handgrepen


De kenmerkende gele Belintra handgrepen worden niet zo warm als RVS tijdens het wassen en dus kan de gebruiker de Sterisystem® open Stericart veilig vastgrijpen aan het einde van het proces.

De dubbele handgrepen zijn aan beide zijden verticaal geplaatst zodat ze ergonomisch kunnen gebruikt worden door zowel kleinere als grotere medewerkers.



## » Geluiddempende geleiders

De geleiders zijn vervaardigd uit kunststof. In tegenstelling tot geleiders in RVS, verzekert deze hoogwaardige kunststof een vlotte geleiding en een sterke geluidsvermindering bij het in- en uitschuiven van RVS transportmanden of -plateaus en kunststof modules. De polyamide werkt ook geluiddempend tijdens het transport. De geleiders hebben een ingebouwde stopfunctie aan beide uiteinden. Elke Sterisystem® open Stericart is uitgerust met 10 paar geleiders wat resulteert in 9 bruikbare posities.

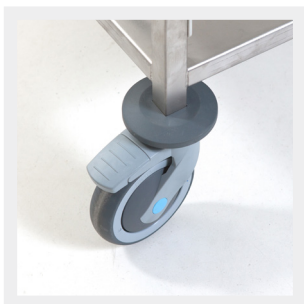

## » Gebruiksvriendelijk

Door de functionele hoogte van 1500 mm kunnen de medewerkers nog boven de transportwagen uitkijken. De hoge zwenkbaarheid van de wielen garandeert een vlotte manipulatie.

De open zijdes vergemakkelijken de toegang aan beide kanten, wat zeker interessant is in geval van dubbele plaatsing per niveau.

## » Veelzijdige modulariteit op maat van uw workflow

Stem uw kar af op uw unieke workflow en normen met ons diverse assortiment open transportkarren. Elk model biedt verschillende modulaire functies om de efficiëntie te optimaliseren. Onze modulaire open transportkarren voldoen aan de specifieke behoeften van uw CSA en bieden aanpassingsvermogen zonder aan efficiëntie in te boeten.

### **Dubbel DIN: Maximale capaciteit**

Bij het Dubbel DIN-model (600 x 600) kunnen op elk niveau twee DIN-transportmanden of -plateaus naast elkaar worden geplaatst. Dit innovatieve ontwerp verdubbelt de capaciteit per niveau en biedt plaats aan maximaal 18 DIN-sets. Bovendien ondersteunt de kar het gebruik van 600 x 600 transportplateaus, ISO transportmanden en -plateaus en ISO PC- en ABS-modules voor verbruiksmaterialen.

### **ISO D-type: Precisie voor ISO-compatibele elementen**

Het ISO D-type model is ideaal voor ISO-compatibele elementen en is geoptimaliseerd voor ISO-transportmanden en -plateaus en ISO PC- en ABS-modules voor verbruiksmaterialen. Bij dit model kunnen geen DIN-componenten worden gebruikt.


### **ISO W-type: Een mix van flexibiliteit**

Het ISO W-type model combineert flexibiliteit en aanpasbaarheid. Hoewel er DIN-transportmanden of -plateaus in kunnen worden geplaatst (beperkt tot één per niveau), blijft het optimaal voor alle ISO-compatibele elementen, inclusief ISO-transportmanden en -plateaus en ISO PC- en ABS-modules voor verbruiksartikelen.


### **2 x DIN: Verdubbeling van de efficiëntie**

Net als de dubbele DIN, kunnen er in de 2 x DIN-versie, twee DIN-transportmanden of schappen op elk niveau in twee aparte kolommen worden geplaatst, waardoor de capaciteit verdubbelt en er plaats is voor maximaal 18 DIN-sets. Het is echter belangrijk om te weten dat dit model niet geschikt is voor ISO-componenten.


## » Mogelijke invulling per paar geleiders (Dubbele DIN)

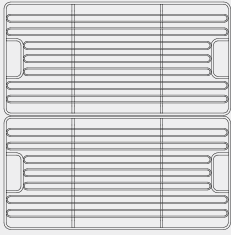

**2 x DIN draadschappen**  
600 x 300 mm  
of  
**1 x ISO draadschap**  
600 x 400 mm

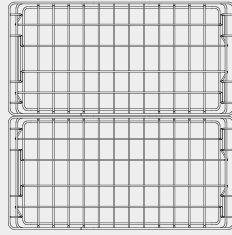

**2 x DIN draadmanden**  
600 x 300 mm  
of  
**1 x ISO draadmand**  
600 x 400 mm

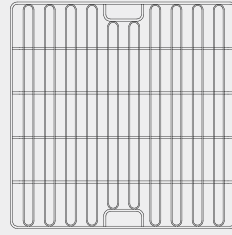

**1 x dubbele DIN draadschap**  
600 x 600 mm



**1 x PC of ABS module of mand**  
600 x 400 mm

## » Sterisystem® open RVS Stericart - 18006 serie



### » Sterisystem® open RVS Stericart - Dubbele DIN

Artikelnummer	Geleiders	Buitenafmetingen
18006 00070	10 paar vaste geleiders - 9 posities bruikbaar	792 x 715 x 1571 mm



### » Sterisystem® open RVS Stericart - ISO D-type

Artikelnummer	Geleiders	Buitenafmetingen
18006 00074	10 paar vaste geleiders - 9 posities bruikbaar	590 x 715 x 1571 mm



### » Sterisystem® open RVS Stericart - ISO W-type

Artikelnummer	Geleiders	Buitenafmetingen
18006 00071	10 paar vaste geleiders - 9 posities bruikbaar	792 x 515 x 1571 mm



### » Sterisystem® open Stericart - 2 x DIN

Artikelnummer	Geleiders	Buitenafmetingen
18006 00092	2 x 10 paar verstelbare geleiders - 2 x 9 posities bruikbaar	819 x 688 x 1658 mm



### » Sterisystem® open Stericart - 2 x DIN + schap

Artikelnummer	Geleiders	Buitenafmetingen
18006 00097	2 x 7 paar verstelbare geleiders - 2 x 6 posities bruikbaar Open top compartiment	819 x 688 x 1658 mm