



## BEDIENUNGSANLEITUNG - MEDICART

Version 4.0

# INHALTSVERZEICHNIS

Definitionen .....	3
Allgemeine Sicherheitsvorschriften.....	3
Einleitung .....	4
Produkt .....	4
Installationsanleitung .....	5
Anwendungshinweise .....	7
Wartung und Inspektion.....	10
Garantie und Service .....	12
Abfallentsorgung.....	12
Häufig gestellte Fragen.....	12

## ÜBERARBEITUNGEN

Version	Datum	Code	Anmerkung
4.0	20.03.2018	00003 00029	-

Diese Ausgabe ersetzt alle vorherigen Ausgaben.

Die Spezifikationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung aktualisiert werden. Die Vervielfältigung oder Weitergabe von Inhalten dieses Dokuments ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Belintra gestattet.

# 1. Definitionen



Weist auf eine drohende Gefahrensituation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren oder tödlichen Verletzungen führt.



Weist auf eine mögliche Gefahrensituation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen führen kann.



Weist auf eine mögliche Gefahrensituation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.  
Damit kann auch auf unsichere Verwendung hingewiesen werden.

## 2. Allgemeine Sicherheitsvorschriften

Zu Ihrer eigenen Sicherheit – und um eine korrekte Verwendung garantieren zu können – ist es wichtig, dass Sie vor Inbetriebnahme des Produkts diese Betriebsanleitung mit allen Tipps und Warnungen gründlich durchlesen. Bewahren Sie diese Anleitung auf und sorgen Sie dafür, dass Benutzer ordnungsgemäß über die Verwendung und Sicherheit informiert sind.

» Belintra ist nicht verantwortlich für:

- Schäden durch Nichtbeachtung der Anweisungen oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung.
- Folgen von Anpassungen am Produkt, die der Benutzer vornimmt.
- Schäden durch eine vom bestimmungsgemäßen Verwendungszweck abweichende Verwendung.



Nicht mehr als 1 Schublade gleichzeitig öffnen, sonst besteht die Gefahr des Umkippen des Medicart.

### Vorsicht

- Verwenden Sie den Wagen ausschließlich in einem technisch ordnungsgemäßen Zustand für den beschriebenen Zweck und in der Umgebung, für die der Wagen vorgesehen ist, mit Beachtung der Betriebsanleitung. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch eine vom bestimmungsgemäßen Verwendungszweck abweichende Verwendung.
- Achten Sie darauf, dass beim Bewegen des Wagens keine Gegenstände lose auf dem Wagen liegen. Auf diese Weise wird vermieden, dass Gegenstände vom Wagen fallen und beschädigt werden und/oder Verletzungen/Schäden verursachen.
- Beim Transport des Wagens kontrollieren, ob die Feststeller an den Laufrollen gelöst sind.
- Vor und während des Fahrens sicherstellen, dass keine Personen oder Gegenstände durch den Wagen eingeklemmt werden können.
- Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an die örtlichen Gegebenheiten an. Um in unvorhergesehenen Situationen die Kontrolle über den Wagen zu behalten, darf mit ihm niemals schneller als in einem normalen Schrittempo (4 bis 5 km/Stunde) gefahren werden.
- Der Medicart eignet sich nicht für einen Einsatz auf unebenen Untergründen und nicht für das Überbrücken von Höhenunterschieden (Schwellen, Treppen usw.). Dabei kann das Gerät umfallen und/oder es kann beschädigt werden.
- Der Medicart eignet sich nur für einen Einsatz in Innenräumen und nicht für einen Einsatz im Freien.
- Auf einer geneigten Oberfläche bei Stillstand immer die Bremsen feststellen.
- Den Wagen nicht nutzen, um sich fortzubewegen.
- Kinder dürfen nicht in die Reichweite des Geräts kommen.
- Personen, die unter dem Einfluss stehen von Drogen, Medikamenten der Alkohol dürfen das Gerät nicht nutzen.
- Kinder sowie Menschen mit physischen, sensorischen oder mentalen Einschränkungen dürfen das Gerät nicht nutzen.

### 3. Einleitung

In dieser Bedienungsanleitung werden der korrekte Gebrauch, die Installation sowie grundlegende Wartungsarbeiten des Belintra Medicart beschrieben. Der Medicart ist ein multifunktionaler Wagen, der modular kombiniert wird, sodass er zahlreiche Möglichkeiten bietet in Bezug auf Zusammenstellung und Anwendungen. Die Wagen werden gegenwärtig unter anderem in Notaufnahmen, Wohn- und Pflegezentren, Anästhesie und Chirurgie eingesetzt. Die Medicart-Wagen erfüllen höchste Sicherheitsnormen sowie alle ergonomischen und hygienischen Anforderungen.

### 4. Produkt


#### » Medicart mit Schubfächern

1. Synthetische Arbeitsfläche
2. Tastenfeld (optional)
3. Schubfächer
4. Handgriffe
5. Eckprofile
6. Wände
7. Stoßdämpfer
8. Laufrollen




#### » Medicart mit Rollladen

1. Synthetische Arbeitsfläche
2. Zahlenschloss
3. Rollladen
4. Handgriff
5. Eckprofile
6. Wände
7. Stoßdämpfer
8. Laufrollen

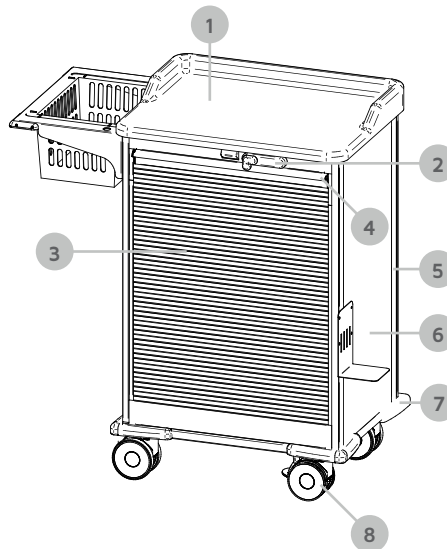

#### » Medicart Schubfächer Small

1. Synthetische Arbeitsfläche
2. Tastenfeld (optional)
3. Schubfächer
4. Handgriffe
5. Eckprofile
6. Wände
7. Stoßdämpfer
8. Laufrollen

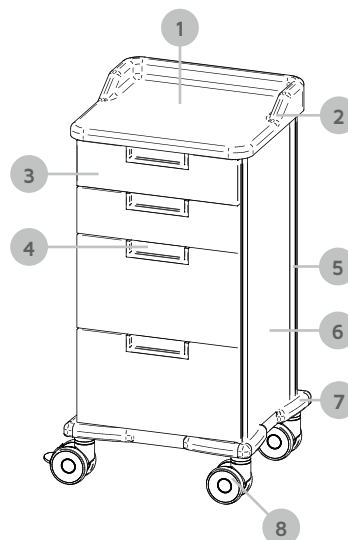

## 5. Installationsanleitung

### » 5.1. Allgemeine Vorgänge

Das Verpackungsmaterial vorsichtig entfernen. Bei Verwendung von Schneidewerkzeug darauf achten, dass das Gerät nicht beschädigt wird.



#### ANMERKUNG

Der Empfänger dieses Produkts ist verantwortlich für das Melden eines Transportschadens sowie die Beantragung eventueller Schadensersatzforderungen beim Transportunternehmen.

Bei Entgegennahme des Geräts sorgfältig prüfen, ob Verpackung und Produkt während des Transports beschädigt wurden. Sollten Ihnen Beschädigungen aufgefallen sein, dann setzen Sie sich unmittelbar mit dem Transportunternehmen in Verbindung und bewahren Sie die Verpackung auf.

### » 5.2. Einrichten der Tastatur (optional für Medicart Schubfächern)

#### A. Passwort ändern

Bei der ersten Nutzung der Tastatur können Sie zum Öffnen/Schließen des Systems den Standardcode ‚2244‘ verwenden. Der Code kann folgendermaßen angepasst werden:

1. Auf die Taste mit dem Gittersymbol (#) drücken. Daraufhin wird die Status-LED orange, was bedeutet, dass ein spezielles Verfahren eingeleitet wird
2. Das aktuelle Passwort eingeben.
3. Anschließend die Zahl 0 und die Zahl 2 eingeben.
4. Das neue Passwort (4 Ziffern) eingeben.
5. Das neue Passwort (4 Ziffern) erneut eingeben.



Sobald das Passwort erfolgreich geändert wurde, leuchtet die Status-LED grün.

Kommt es während des Änderungsverfahrens zu einem Fehler (falsche Kombination) wird die Status-LED rot.

#### B. Passwort zurücksetzen

Wurde das Passwort vergessen, kann erneut das Standard-Passwort (‚2244‘) eingestellt werden. Hierfür bitte den Service Desk kontaktieren:

- Für Belgien: **[www.belintra.be/service](http://www.belintra.be/service)**
- International: über Ihren lokalen Vertriebspartner

#### C. Automatische Verriegelung

Wurde die Funktion ‚Automatisch verriegeln‘ aktiviert, dann wird das Schloss nach Ablauf einer flexibel einstellbaren Frist von der offenen Position automatisch in die geschlossene Position gestellt.

Zum Einschalten dieser Funktion bitte folgendermaßen vorgehen:

1. Gleichzeitig die Tasten 0 und 1 drücken und beide Tasten 5 Sekunden lang gedrückt halten bis die Status-LED orange aufleuchtet
2. Den folgenden Code eingeben: 6 7 1 6 9 5 3 2
3. Mit 3 Ziffern die variable Dauer in Sekunden eingeben (beispielsweise 006 = automatisch nach 6 Sekunden verriegeln)
4. Konnte diese Funktion erfolgreich aktiviert werden, leuchtet die Status-LED grün. Ist der Vorgang nicht gelungen, leuchtet die Status-LED rot.

Zur deaktivieren die Funktion „Automatisch Verriegeln“, wiederholen sie oben stehende Schritten.

Geben Sie bei **Schritt 3**, drei Mal Null ein : 000 = 0 Sekunden. Der Wagen verriegelt sich nicht mehr automatisch.

### » 5.3. Einstellen des elektronischen Zahlenschlosses (Medicart Rollladen)



#### **Standardcode bei Lieferung:**

- Anwendercode: 2244
- Mastercode: 11335577

#### **Anwendercode ändern:**



→ [MASTERCODE] → [02] → [NEUER ANWENDERCODE]

Beispiel:



→ [11335577] → [02] → [1234]

Jetzt lautet der Anwendercode 1234.

#### **Mastercode ändern:**



→ [MASTERCODE] → [01] → [NEUER MASTERCODE]

Beispiel:



→ [11335577] → [01] → [12341234]

Jetzt lautet der Mastercode 12341234




#### **ANMERKUNG**

Bitte beachten Sie, dass Sie die alleinige Verantwortung tragen für eine sichere Aufbewahrung des Mastercodes. Denn nur Sie kennen den neuen Mastercode. Ohne diesen Code kann das Schloss nicht mehr geöffnet werden, wenn auch der Anwendercode nicht mehr bekannt ist.

## 6. Anwendungshinweise

### » 6.1. Nutzung der Laufrollen

Der Medicart verfügt über 4 schwenkbare doppelte Laufräder. Das Schwenkrad vorne rechts (**2**) verfügt über eine Bremse, Das Schwenkrad hinten links (**3**) verfügt über einen Richtungsfeststeller.

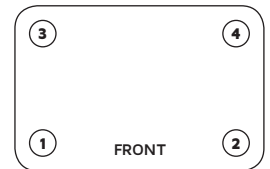

### » 6.2. Positionierung ergonomische Gitterwände (Medicart Rollladen)

#### Position 1

Bei einer Verwendung der Wand in dieser Position können die Behälter schräg gestellt werden. In diesem Fall befindet sich die Lücke in den Führungsschienen oben. Das ist optimal für höhere Positionen im Wagen. Bei dieser Anordnung sollten unbedingt Stopps eingeplant werden, um zu vermeiden, dass die Behälter komplett aus den Gitterwänden geschoben werden.



#### Position 2

Diese Position der Wand ist ideal, um die Behälter horizontal zu öffnen. In diesem Fall befindet sich die Lücke in den Führungsschienen unten. Das ist optimal für tiefere Positionen.



### » 6.3. Gebrauch der Tastatur (Medicart Schubfächern)

#### A. Gebrauch der roten/grünen Status-LED

##### Normaler Modus


Im normalen Modus zeigt die zweifarbige Status-LED (rot und grün) den aktuellen Zustand des Motors an.

- Rot blinkend = geschlossen
- Grün blinkend = geöffnet

##### Konfigurationsmodus

Bei Umschalten in den Konfigurationsmodus zum Ändern des Passworts, zum zurückzusetzen oder um die automatische Verriegelung zu aktivieren, dann leuchtet die LED-Anzeige orange.

Nach Abschluss der einzelnen Vorgänge leuchtet die grüne oder rote LED 3 Sekunden lang auf, um darüber zu informieren, ob die jeweilige Manipulation erfolgreich war oder nicht (grün = erfolgreich).

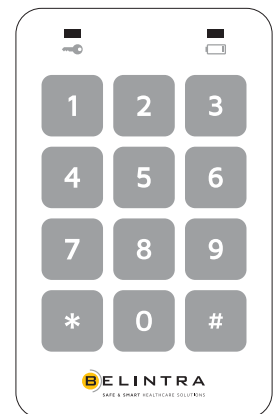

##### Batterie-LED

Muss die Batterie ausgewechselt werden, dann leuchtet die Batterie-LED auf. Fällt die Spannung unter ein im Vorhinein festgelegtes Niveau (4,8 V), leuchtet die Batterie-LED rot auf, wobei das Gerät jedoch wie gewohnt weiter funktioniert.

Wird die Batterie jedoch nicht rechtzeitig ausgewechselt und sinkt die Spannung weiter bis unter ein zweites Niveau (4,2 V), dann stellt der Motor automatisch auf die offene Position in der er auch bleibt.

#### B. Öffnen/Schließen


Das Schloss kann durch Eingabe eines vierstelligen Codes über die Tastatur ver- oder entriegelt werden. Ist der Code korrekt, wird das Schloss ver- oder entriegelt und der Anwender wird über die Status-LED über die neue Position informiert. Wurde ein falscher Code eingegeben, passiert nichts.

Wenn Sie eine falsche Zahl eingegeben haben, können Sie einfach fortfahren, indem Sie den richtigen Code eingeben (Sie müssen demnach den falschen, vierstelligen Code nicht komplett eingeben, bevor Sie mit der Eingabe des richtigen Codes beginnen), denn das System berücksichtigt nur die letzten 4 eingegebenen Zahlen.

## » 6.4. Gebrauch elektronisches Zahlenschloss (Medicart Rollladen)

### A. Funktionsweise

Das elektronische Zahlenschloss wird über einen Hebel geöffnet und geschlossen. Zum Entriegeln des Schlosses muss ein 4-stelliger Code eingegeben werden oder das Schloss kann mit einem Schlüssel entriegelt werden.

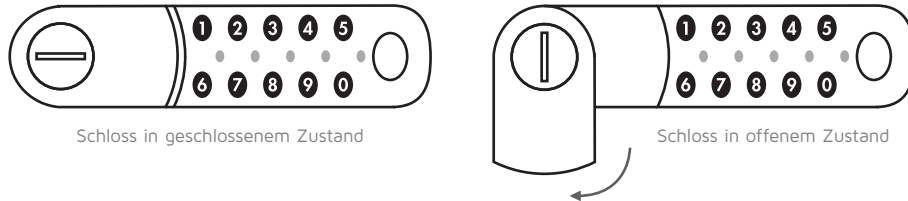

### B. Bedienung

Zum Öffnen des Schlosses einen 4-stelligen Anwendercode oder den Mastercode eingeben. Hierfür einfach die 4 Zahlen hintereinander eingeben. Bei einer korrekten Eingabe ist ein leichtes Klicken zu hören und Sie sehen 4 grüne Lichter brennen. Anschließend kann der Hebel geöffnet werden. Nach 4 Sekunden verschließt sich das Schloss wieder automatisch.


Bei einer fehlerhaften Eingabe blinkt das rote Licht und das Schloss lässt sich nicht öffnen. Nach 3 falschen Eingaben kann das Schloss 10 Sekunden lang nicht bedient werden.

### C. Batteriestandskontrolle

Zur Kontrolle des Batteriestands 2 Mal auf die Logo-Schaltfläche drücken. Abhängig vom Batteriestand leuchten dann zwischen 1 bis 5 grünen Lampen auf.


## » 6.5. Gebrauch manuelle Sperre (optional für Medicart Schubfächern)

Mit der manuellen Sperre können alle Schubfächer des Medicart mithilfe eines Brechsiegels blockiert werden. Sollte ein Schubfach in diesem Fall dennoch geöffnet werden, wird das Brechsiegel zerstört und man kann sehen, dass der Wagen geöffnet wurde. Die manuelle Sperre so schließen, dass die Stange gegen die Schubfächer drückt und das Brechsiegel im Scharnier anbringen. Sollen die Schubfächer wieder geöffnet werden, einfach das Brechsiegel wieder entfernen.

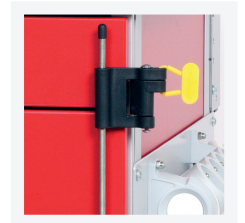

## » 6.6. Gebrauch der herunterklappbaren Arbeitsfläche (optional)

- Darauf achten, dass beim Hochziehen der Arbeitsfläche die 2 Stützen vollständig ausgeklappt wurden.
- Die Arbeitsfläche rastet automatisch ein.
- Bevor die Arbeitsfläche nach unten geklappt wird: gleichzeitig die 2 Schieber eindrücken und die Arbeitsfläche nach unten senken.

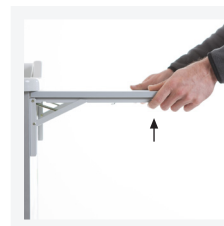

## » 6.7. Gebrauch des Serumhalters (optional)

Zum Verstellen der Höhe den schwarzen Ring am Serumhalter nach oben schieben.





## » 6.8. Notöffnung

### A. Tastatur (Medicart Schubfächern)

Lässt sich die Tastatur nicht mehr öffnen, kann die Notöffnung genutzt werden. Hierfür den im Lieferumfang inbegriffenen Schlüssel und das Schloss unten am Medicart verwenden.

#### 1. Altes System

#### 2. Neues System




**Achtung:** Die Notöffnung nur bei einem Defekt des Schlosses nutzen. Sobald die Tastatur wieder funktioniert, muss die Notöffnung geschlossen werden.

### B. Elektronisches Zahlenschloss (Medicart Rollladen)

Bei einem Defekt oder einer leeren Batterie kann der Schlüssel zum Öffnen des Wagens verwendet werden. Hierfür einfach das Schlüsselloch verwenden, das sich neben den Tasten des elektronischen Zahlenschlosses befindet.

## » 6.9. Montage des Zubehörs für den Medicart

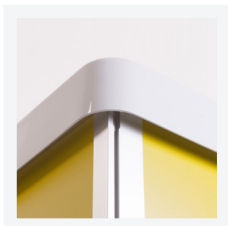

### Funktionsweise T-Nut

In den Eckprofilen befinden sich T-Nute, in welche Federmuttern eingeführt werden können. An diesen Federmuttern kann das Zubehör befestigt werden. Oben an den Eckprofilen befindet sich ein Langloch, sodass die Federmuttern problemlos in der T-Nut angebracht werden können.




### Federmutter vorbereiten.

Die Federmuttern lassen sich durch vorheriges leichtes Eindrücken problemlos in den T-Nuten einführen.

### Federmutter montieren

Die Federmutter kann ganz einfach über die Öffnung oben an den Eckprofilen, direkt unter der Arbeitsfläche, installiert werden. Die Federmutter nach hinten und unten drücken.

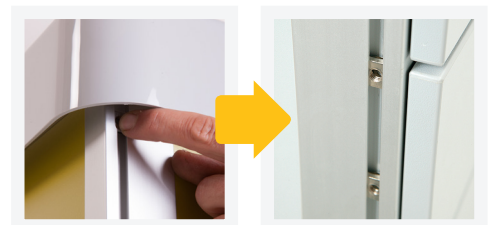

### Montage des Zubehörs für den Medicart








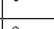
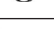
Die Federmuttern abhängig vom jeweiligen Zubehör an der entsprechenden Stelle anbringen. Die im Lieferumfang inbegriffenen M6-Schrauben zum Befestigen des Zubehörs verwenden.



## » 6.10. Übersicht Zubehör Medicart

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick darüber, welches Zubehör für jeden Medicart-Typ verfügbar ist.

Die Informationen zur Montage geben an, welche Arten von Schrauben und Muttern zur Montage des Zubehörs am Medicart verwendet werden.

Fixierung	A	M6 x 8 Rundkopfschraube	
	B	M6 x 10 Rundkopfschraube	
	C	M6 x 12 Rundkopfschraube	
	D	M6 x 8 Senkschraube	
	E	M8 x 20 Schraube + M8 Sicherungsmutter + M8 Unterlegscheibe	  
	F	M8 x 25 Schraube + M8 Federring	 

Zubehör	Bestellnummer	Medicart Schubfächern	Medicart Rollläden	Medicart Schubfächern Small	Doppelt Medicart Schubfächern	Bestätigung *
Schiebegriff	19010 00005	✓	✓	-	-	B (4 Stück)
	19022 00005	-	-	✓	-	B (4 Stück)
	19014 00051	-	-	-	✓	B (4 Stück)
Metallbehälter, grau	19010 00006	✓	✓	-	**	A (4 Stück)
	19022 00002	-	-	✓	-	A (4 Stück)
Metallbehälter, grau mit Deckel	19010 00044	✓	✓	-	**	A (4 Stück)
Wally®-Abfallbehälter mit Kniehebel	19010 00023	✓	✓	-	**	A (4 Stück)
	19022 00006	-	-	✓	-	A (4 Stück)
Einklappbare Arbeitsfläche	19010 00008	✓	✓	-	-	A (4 Stück)
	19022 00009	-	-	✓	-	A (4 Stück)
	19014 00028	-	-	-	✓	A (4 Stück)
Stala-Grundgestell für verschiedene Arten von Schalen	19010 00010	✓	-	-	-	A (4 Stück)
	19010 00022	-	✓	-	-	A (4 Stück)
	19014 00045	-	-	-	✓	A (4 Stück)
6 Schalen für Stala-Gestell	15010 00004	✓	✓	-	✓	E (2 Sätze)
5 Schalen für Stala-Gestell	15010 00003	✓	✓	-	✓	E (2 Sätze)
4 Schalen für Stala-Gestell	15010 00002	✓	✓	-	✓	E (2 Sätze)
3 Schalen für Stala-Gestell	15010 00001	✓	✓	-	✓	E (2 Sätze)
Abflussvorrichtung für Stala-Gestell	19010 00001	✓	✓	-	✓	E (2 Sätze)
Abflussvorrichtung für Seitenabfluss für Medicart	19010 00014	✓	✓	-	-	A (4 Stück)
	19022 00003	-	-	✓	-	A (4 Stück)
	19014 00030	-	-	-	✓	A (4 Stück)
DIN-Schiene für Stala-Gestell	19010 00029	✓	✓	-	✓	F (2 Sätze)
DIN-Schiene (inklusive Abstandhalter) für Medicart	19010 00078	✓	✓	-	-	F (2 Sätze)
	19022 00012	-	-	✓	-	F (2 Sätze)
	19014 00077	-	-	-	✓	F (2 Sätze)
Müllbehälter für DIN-rail	19010 00060	✓	✓	✓	✓	-
Behälterhalter für Kanülen	19010 00007	✓	✓	✓	✓	A (2 Stück)
Verbindungsteil für PC-Körbe	19010 00003	✓	✓	-	**	B (4 Stück)
	19022 00001	-	-	✓	-	B (4 Stück)
Verbindungsteil für Dateibox	19010 00004	✓	✓	-	**	B (4 Stück)
Dateibox	15007 00017	✓	✓	-	✓	-
Flexibler Arm für Portabilität	14009 00001	✓	✓	✓	✓	A (2 Stück)
Flexibler Arm für Portabilität mit Klemmen für Portabilität	14009 00037	✓	✓	✓	✓	A (2 Stück)
Brett für Herzmassage	19010 00031	✓	✓	-	✓	A (4 Stück)
Sauerstoffflaschen-Halter	19010 00045	✓	✓	✓	✓	A (2 Stück)
Dichtverschluss	19010 00034	✓	✓	✓	✓	B (4 Stück)
Steckdosen mit Erdungsstiften - typ E	19010 00036	✓	✓	-	**	A (4 Stück)
Serumhalter aus Edelstahl mit 2 Haken	14008 00004	✓	✓	✓	✓	D (2 Stück)
Serumhalter aus Edelstahl mit 4 Haken	14008 00006	✓	✓	✓	✓	D (2 Stück)
Halterung für Defibrillator	19010 00033	✓	✓	-	✓	C (2 Stück)
Verbindungsstück für 3 Handschuhfächer	19010 00039	✓	✓	-	**	A (4 Stück)
	19022 00008	-	-	✓	-	A (4 Stück)
Haken	19010 00040	✓	✓	✓	✓	B (2 Stück)
Katheterhalter für Seite Medicart	19010 00052	✓	✓	-	✓	A (2 Stück)
Arbeitsfläche für Maus und Scanner	19022 00011	✓	✓	✓	✓	A (2 Stück)
Halter für Seifenspender	19010 00076	✓	✓	✓	✓	A (2 Stück)

\* Falls 2 Zubehörteile zusammen montiert werden (z. B. Stala + Serumhalter), sind andere Schrauben erforderlich.

\*\* Nur in Verbindung mit zusätzlicher Montageplatte (19014 00032)

## 7. Wartung und Inspektion

### 7.1. Die Batterien des Medicart mit Schubfächern und Tastatur auswechseln

Das Batteriefach ist über das unterste Schubfach des Medicart gut zu erreichen, sodass die Schutzabdeckung des Schließmechanismus leicht entfernt werden kann. Hierfür bitte wie folgt vorgehen:



Das unterste Schubfach des Medicart ausräumen.




Anschließend den Rahmen der Laufschienen abmontieren. Einen Schraubenzieher zwischen Rahmen und Laufschiene klemmen. Das Schubfach kann entfernt werden, indem gleichzeitig seitlich Kraft auf den Schraubenzieher ausgeübt und das Schubfach nach oben gedrückt wird. Den Vorgang für die andere Laufschiene wiederholen.



Jetzt ist die Schutzabdeckung gut zu erreichen.



Die 2 Schrauben entfernen (an jeder Seite), mit der die Schutzabdeckung an der Rückwand des Medicart befestigt sind.

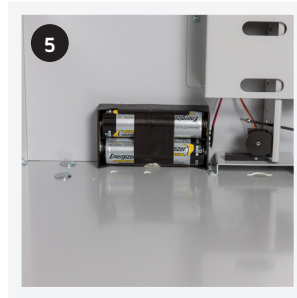

Jetzt (4 x D-Zellen 1,5 V) sind die Batterien gut zu erreichen und können durch Batterien desselben Typs ersetzt werden.

### 7.2. Die Batterien des Medicart mit Schubfächern und Tastatur auswechseln (neues System)

Die Batterie ist durch Entfernen der Schutzplatte erreichbar. Hierfür bitte wie folgt vorgehen:



Die 2 Schrauben der Abdeckplatte mit einem hex-Schraubendreher losmachen.



Ersetzen der LR25 2- (27Ah-6V) Batterie durch den gleichen Typ (auch abrufbar bei Belintra).

### » 7.3. Die Batterien des elektronischen Zahlenschlosses am Medicaart mit Rollläden auswechseln



Die Batterien befinden sich innen im Wagen, direkt über dem Rollladen, neben der Drucktaste. Sie benötigen 2 AA-Batterien.



Die Schutzabdeckung ist mit einer Schraube befestigt. Die Schraube lockern und die Schutzabdeckung entfernen.



Jetzt können die Batterien ausgewechselt werden. Bitte verwenden Sie dabei Batterien desselben Typs.

### » 7.4. Inspektion

- Der Medicaart muss mindestens einmal pro Jahr von technischen Fachkräften nachgesehen werden. Dabei sollten insbesondere die folgenden Punkte kontrolliert werden: Verschleiß, fester Sitz der Schrauben und Kontrolle der Schweißstellen.
- Die einwandfreie Funktionsweise des Medicaart sollte regelmäßig geprüft werden. Mögliche Probleme sollten von qualifizierten Mitarbeitern untersucht werden oder kontaktieren Sie den Service Desk bzw. Ihren Händler. Belintra haftet nicht für Schäden basierend auf einem unsachgemäßen Gebrauch bzw. unsachgemäße Vorgänge oder eine fahrlässige Wartung.
- Prüfen Sie, ob das Batteriegehäuse / die Umhüllung gegebenenfalls Verformungen oder Beschädigungen aufweist. Wenn ja, dann müssen die Batterien gemäß den in Kapitel 7 aufgeführten Anweisungen ausgewechselt werden: Wartung und Inspektion.
- Bei Kontrolle oder Gebrauch nicht an den Kabeln innen am Gerät ziehen und diese nicht an eine andere Stelle verlegen oder sie beschädigen.

### » 7.5. Reinigung

- Den Medicaart mit einem leicht befeuchteten Tuch und einem sanften (Haushalts)Reiniger säubern.
- Keine aggressiven Lösemittel – wie Alkohol, Verdünner und Salzlösungen verwenden.
- Nicht mit Flüssigkeiten übergießen (Wasser), da ansonsten Wasser in das Produkt eindringen kann. Das kann zu Störungen führen.




#### Reinigung von Montage-Slitze für die Zubehör

Die Slitze für die Befestigung des Zubehörs können mit einem Desinfektionstuch auf einem Wattestäbchen gereinigt werden. Auf diese Weise kann der gesamte Schacht gereinigt werden.

## Schlitz für Rollläden reinigen

Lösen Sie die 2 Schrauben der Kunststoffteile an der Oberseite und schieben Sie diese Teile so weit wie möglich nach oben. Sie können den Rollladen extrahieren, um den Rollladen selbst und die Führungen vollständig zu reinigen.

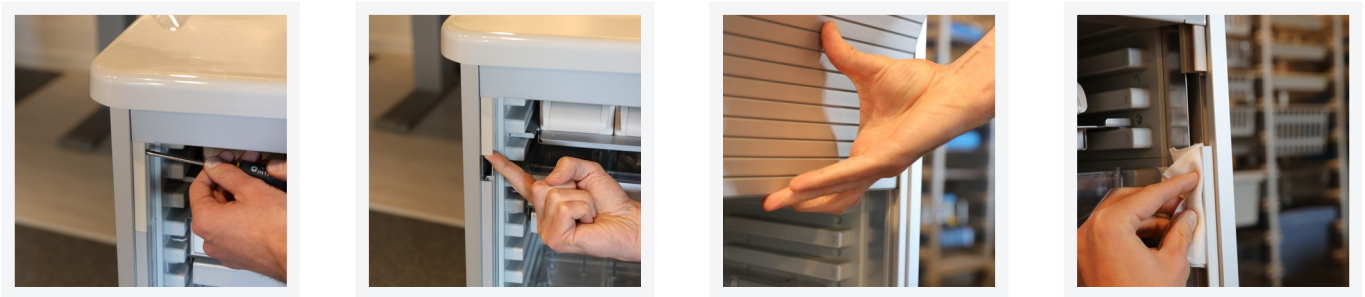

## 8. Garantie und Service

Die Garantie erstreckt sich auf Material- oder Herstellungsfehler der Produkte ab Produktionsdatum. Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg bitte auf. Bei zweckfremder Verwendung, unsachgemäßer Behandlung, übertriebener Kraftanwendung und Reparaturen durch unqualifizierte Personen und/oder geöffneten Elektronikeinheiten erlischt die Garantie. Für weitere Informationen über die Garantiebedingungen wenden Sie sich bitte an Belintra.

Wenn Sie den Medicart direkt bei Belintra gekauft haben, können Sie hier technische Hilfe beantragen:

**<http://www.belintra.be/service>**. Andernfalls nehmen Sie bitte Kontakt auf mit Ihrem Händler.

## 9. Abfallentsorgung

Dieses Gerät darf am Ende der Produktlebensdauer nicht zusammen mit normalem Haushaltsabfall entsorgt werden. Das Gerät muss von anderen Abfallsorten getrennt werden und an einer Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden. So kommt es nicht zu negativen Folgen für Umwelt oder menschliche Gesundheit, aufgrund einer unsachgemäßen Entsorgung von Abfall.



## 10. Häufig gestellte Fragen.

### **F.: Wie lange halten die Batterien der Tastatur?**

Das hängt sehr von der Anwendung ab, durchschnittlich 6 Monate.

### **F.: Wie lange halten die Batterien des elektronischen Zahlenschlosses?**

Das Schloss kann bis zu 80.000 Mal geöffnet werden.

### **F.: Das Tastenfeld leuchtet rot aber die Schieber lassen sich nicht schließen?**

Kontrollieren Sie die Stellung der Notöffnung. Möglicherweise befindet sie sich in geöffneter Position. Bitte immer darauf achten, dass die Notöffnung nach jeder erneuten Inbetriebnahme der Tastatur wieder geschlossen wird.







[www.belintra.com](http://www.belintra.com)

Belintra N.V. setzt alles daran, um richtige und vollständige Informationen zu Verwendung und Installation dieses Produkts zur Verfügung zu stellen. Die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Informationen können angepasst werden, ohne dass im Vorhinein darauf hingewiesen wird. Die Abbildungen dienen nur der Orientierung und können Informationen oder Funktionen beinhalten, die auf Ihr Gerät nicht zutreffen. Belintra N.V. haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in dieser Bedienungsanleitung. Die aktuellsten Produktinformationen erhalten Sie jederzeit bei Belintra N.V.

© BELINTRA, NV – MDCA/HL/DE/0004 - 03/2018 - Aus diesem Dokument darf nichts ohne eine vorherige schriftliche Genehmigung übernommen werden.