



Für einen einmaligen ersten Gebrauch den IT Pack mithilfe des im Lieferumfang inbegriffenen Spiralkabels am Stromnetz anschließen und die Batterie mindestens 12 Stunden lang ohne Unterbrechung laden.



1. Der eingebaute PC kann über den Hauptschalter an der Rückseite des Medicart, eingeschaltet werden. Nachdem das Operating System eingerichtet wurde, muss der PC neu gestartet werden, indem der Hauptschalter aus- und wieder eingeschaltet wird.




Die LED-Anzeige brennt weiter, selbst wenn der Hauptschalter ausgeschaltet wurde. Die LED-Anzeige geht nur aus, wenn der Medicart aufgrund einer zu geringen Batterieladung in den Standby-Modus geht.



Über das USB-gesteuerte Schloss wird der Medicart zu- und aufgeschlossen. Dabei legt Ihr Systemadministrator fest, auf welche Art und Weise dies erfolgen soll.

» Batterieladestandsanzeige

Das Niederspannungssystem des Medicart zeigt über eine an der Unterseite des Wagens angebrachte LED-Anzeige und die Battery Monitor-App auf dem Desktop des PCs (nur wenn die Anwendung installiert wurde, entfällt beispielsweise bei einem Thin Client) den Batterieladestand an.

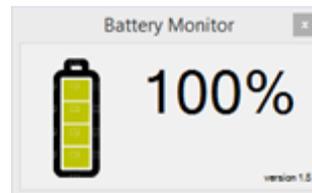

Öffnen der Battery Monitor-App:



1. Zum Öffnen der Anwendung auf dem rechts unten im Bildschirm angezeigten Systembalken mit der rechten Maustaste auf das Symbol
2. „Show“ klicken
3. „Always in top“ auswählen, damit die Anwendung immer angezeigt wird
4. Die Anwendung mit „Exit“ schließen



Die verbleibende Batterieleistung liegt zwischen 100 % und 70%

Die LED-Anzeige blinkt, wenn der Medicart an das Stromnetz angeschlossen ist. **Laden Sie die Batterie so lange wie möglich, am besten bis die LED-Anzeige aufhört zu blinken.** Dann ist die Batterie 100 % geladen.



Die verbleibende Batterieleistung liegt zwischen 69 % und 40 %



Die verbleibende Batterieleistung liegt zwischen 39 % und 10 %

Wird der Medicart häufig mit einer Batterieleistung von 30 % oder weniger genutzt, dann verkürzt dies entschieden die Batterielebensdauer.



Wird die LED-Anzeige rot und blinkt schnell, dann beträgt die Batterieladung weniger als 10 %.

Bitte verbinden Sie in diesem Fall den Medicart unmittelbar mit dem Stromnetz und laden Sie die Batterie zu 100 %!




Sinkt die Batterieladung auf unter 5 %, wird das folgende Pop-up eingeblendet. Der PC wird wenige Minuten später heruntergefahren und die LED-Anzeige schaltet sich aus. Das bedeutet, dass der Medicart in den Standby-Modus übergegangen ist.

Bitte verbinden Sie in diesem Fall den Medicart unmittelbar mit dem Stromnetz und laden Sie die Batterie zu 100 %.

» Notöffnung elektronisches Schloss

Lässt sich das elektronische Schloss nicht mehr öffnen, kann die Notöffnung genutzt werden. Hierfür den im Lieferumfang inbegriffenen Schlüssel und das Schloss an der Unterseite des Medicart verwenden.

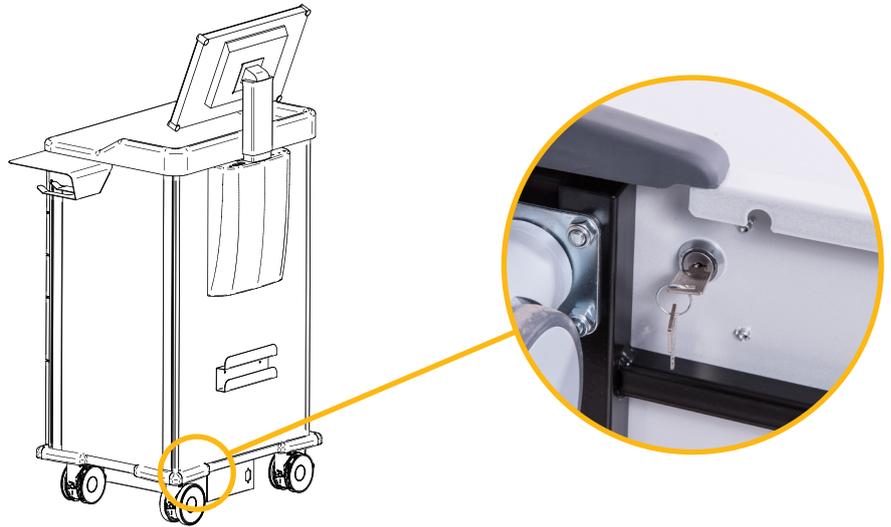

Achtung: Die Notöffnung nur bei einem Defekt des elektronischen Schlosses nutzen. Sobald das elektronische Schloss wieder funktioniert, muss die Notöffnung geschlossen werden.

» Wichtige Hinweise für den täglichen Gebrauch des Medicart

- Passen Sie beim Schieben des Wagens Ihre Geschwindigkeit an die Umgebungsbedingungen an. Um in unvorhergesehenen Situationen die Kontrolle über den Wagen zu behalten, darf mit ihm niemals schneller als in einem normalen Schrittempo (4 bis 5 km/Stunde) gefahren werden.
- Achten Sie darauf, dass beim Bewegen des Wagens keine Gegenstände lose auf dem Wagen liegen.
- Kontrollieren Sie, ob der Netzstecker aus der Steckdose entfernt wurde, bevor Sie mit dem Medicart losgehen. Nie am Kabel ziehen. Beim Entfernen des Netzkabels aus der Steckdose nicht das Kabel, sondern den Stecker festhalten.
- **Verbinden Sie den Medicart so häufig wie möglich mit dem Stromnetz. Laden Sie die Batterie jeden Tag wieder auf 100 %**

Die vollständigen Hinweise finden Sie in der im Lieferumfang inbegriffenen Bedienungsanleitung oder auf www.belintra.com/de/downloads.