



Antes de utilizarlo, conecta el carrito a la red eléctrica con el cable espiral suministrado y deja que la batería se cargue hasta que el indicador LED deje de parpadear (100%).

El PC se puede poner en marcha con el interruptor de encendido/apagado situado en la parte posterior/superior del carro.


- Presione brevemente el pulsador, el LED blanco se ilumina y el aparato se enciende.
- Para apagar el aparato: vuelva a pulsar brevemente el botón pulsador.
- El LED blanco parpadeará y el PC se apagará.
- La unidad se apagará después de 1 minuto.
- Para apagar el aparato y el PC: mantenga pulsado el botón durante 3 segundos.

Recomendamos encender/apagar el PC a través del botón de encendido/apagado situado en la parte posterior/superior del carro. De esta forma Windows se cerrará correctamente (lo mismo con una batería muy descargada). Si el PC se sigue cerrando a través de Windows y desea reiniciarlo, siga el siguiente procedimiento:







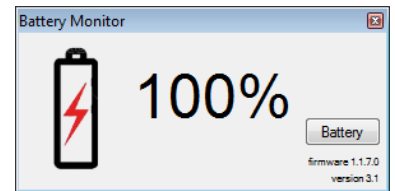

- Pulse una vez el botón de encendido/apagado
- Espere 30 segundos hasta que se encienda el LED del botón
- Pulse el botón de encendido/apagado por segunda vez
- El PC se reiniciará.

» Indicación del estado de la batería - primera generación

El controlador COW PCB del carro muestra la carga restante de la batería mediante un indicador LED en la parte superior del carro y la aplicación Battery Monitor en la pantalla del PC (sólo cuando la aplicación está instalada). Puede acceder a esta aplicación abriéndola a través del icono situado en la parte inferior derecha de la pantalla.




» Indicación LED

		La batería tiene una carga entre el 100% y el 70%. El indicador LED parpadea cuando el Medicart está conectado a la red eléctrica. Cargue la batería tantas veces como sea posible hasta que el indicador LED deje de parpadear. La batería estará entonces cargada al 100%.
		La batería tiene una carga entre el 69% y el 40%.
		La batería tiene una carga entre el 39% y el 10%. El uso frecuente del Medicart con un porcentaje de batería del 30% o inferior acorta significativamente la vida de la batería.
		La batería tiene una carga inferior al 10% cuando el LED parpadea rápidamente en rojo. Conecte inmediatamente el Medicart a la red eléctrica y deje que la batería se cargue al 100%.

» Indicación del estado de la batería - 2ª generación

La placa de circuito impreso del controlador COW del carro muestra la carga restante de la batería mediante un indicador LED en la parte superior del carro y la aplicación Battery Monitor en la pantalla del PC (sólo cuando la aplicación está instalada). Puede acceder a esta aplicación abriéndola a través del icono situado en la parte inferior derecha de la pantalla.

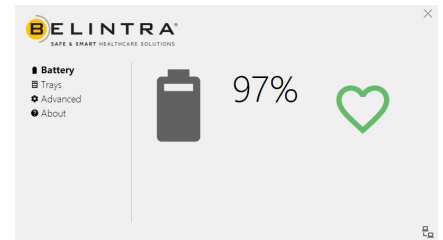

» Indicación LED

		en batería - SOC entre 100% y 50%			en batería - SOC inferior al 9%
		en batería - SOC entre 49% y 20%			en la toma de corriente - SOC inferior al 100%
		en batería - SOC entre 19% y 10%			en la toma de corriente - SOC igual al 100%

* SOC = State Of Charge (estado de carga)


» Ajustes de pantalla

Para evitar que los ajustes de la pantalla se modifiquen inadvertidamente, el menú OSD se entrega siempre bloqueado. Consulte las instrucciones siguientes para bloquear y desbloquear el menú de pantalla. Se recomienda volver a bloquear el menú de pantalla después de ajustar la configuración.

» MD24

Para bloquear el menú OSD, mantenga pulsado el botón mientras la pantalla LCD esté apagada y, a continuación, pulse el botón para encender la pantalla LCD.

Para desbloquear el menú OSD, mantenga pulsado el botón mientras la pantalla LCD esté apagada y, a continuación, pulse el botón para encender la pantalla LCD.

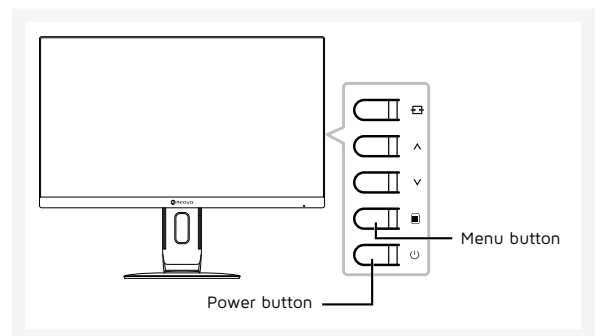

» X22 en X24

Cuando el OSD está bloqueado, todos los botones del teclado están desactivados.

Tipo de bloqueo OSD	Funcionamiento de la cerradura	Operación de desbloqueo
Bloquear todos los botones	Mantén pulsados los botones , y durante 5 segundos.	Mantenga pulsados los botones , y durante 5 segundos o hasta que aparezca el menú OSD.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo utilizar el menú OSD, consulte el manual de la pantalla.

» Directrices importantes

- Ajuste su velocidad a las condiciones inmediatas cuando mueva el carro. Para mantener el control del carro en situaciones imprevistas, nunca debe superar un ritmo de marcha normal (4 a 5 km/h).
- Asegúrese de que no haya objetos sueltos sobre el carro cuando lo desplace.
- Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación antes de mover el carro. No tire nunca del cable. Al desconectar el cable de alimentación, no sujete el cable, sino el enchufe.
- Consejos para garantizar una duración óptima de la batería: Conecte el carro a la red eléctrica con la mayor frecuencia posible. Cargue la batería al 100% a diario.

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente: support@belintra.com o +32 (0)9 389 00 10.