



Drooginstructies

Sterisystem™ gesloten RVS transportwagens



Belangrijk – Gelieve deze instructies door te geven aan de personen die verantwoordelijk zijn voor het reinigen van de Sterisystem™ gesloten RVS transportwagens

Voor een optimale werking van uw transportwagens, gelieve de drooginstructies hieronder te volgen:

- **Droogtijd: 8 minuten aan 85°C in droge lucht.**
- **Droge lucht** = lucht met een relatieve vochtigheid van maximaal 60% aan een kamertemperatuur van 21°C. Omgerekend is dit een relatieve luchtvochtigheid van maximum 1,1 % aan 85 °C.

Voor bijkomende informatie over uw Sterisystem™ gesloten RVS transportwagens, gelieve contact op te nemen met uw lokale Account Manager.